

SISTEMA
DE ABLAÇÃO
COOL-TIP™
RF E SERIES

GUIA DE UTILIZAÇÃO



INSTALAÇÃO DOS CABOS

1. Conecte todos os cabos na parte traseira do gerador.




2. Ligue o equipamento e aguarde o autoteste.

BIVOLT AUTOMÁTICO



CONEXÃO DOS ELETRODOS DE RETORNO

3. Conecte os eletrodos de retorno de acordo com as orientações de segurança e quantidade recomendada

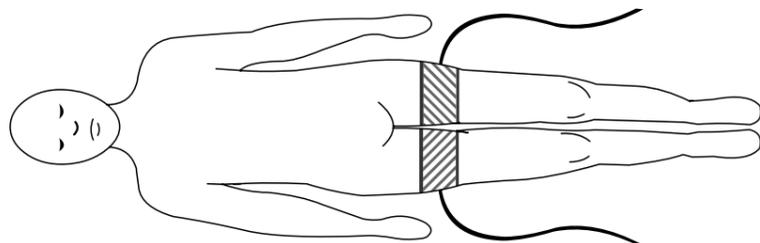


4. Conecte a ponta do eletrodo de retorno no cabo de conexão e o cabo na parte frontal do gerador





KITS

Eletrodo Single

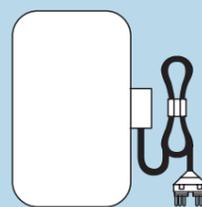

Eletrodo cluster e kit múltiplo

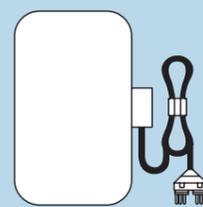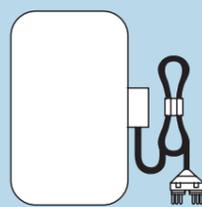


ATIVACÃO DO ELETRODO

5. Abra o kit de forma estéril, monte o equipo para circulação de água resfriada

6. Monte a parte laranja do equipo na bomba

7. Conecte uma ponta do equipo no reservatório e o spike na água destilada, resfriada a menos de 10° C

8. Conecte o eletrodo na parte frontal do gerador

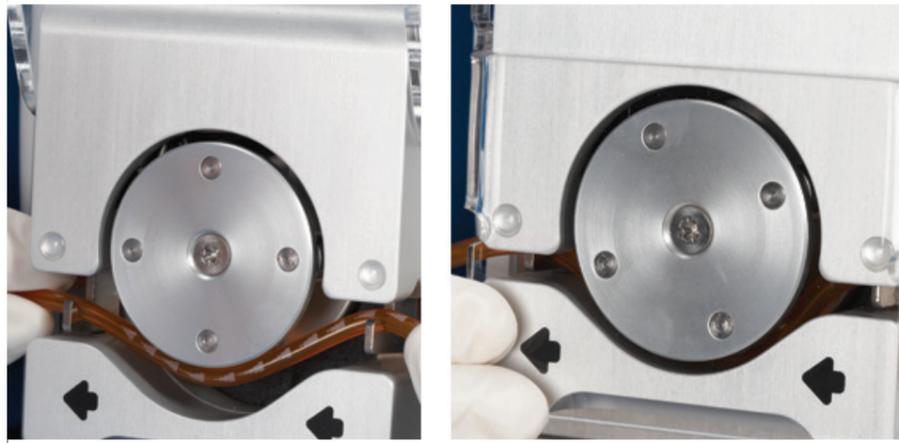

CONFIGURAÇÃO DO PROCEDIMENTO

9. Selecione o "modo de ablação" desejado



10. Programe o tempo do procedimento



11. Ative o eletrodo



12. Inicie a ablação utilizando o botão de início ou pedal




SONDA REMOTA DE TEMPERATURA

13. Conecte a ponta da sonda na parte frontal do gerador





14. Configure a temperatura limite e selecione a parada automática da ablação

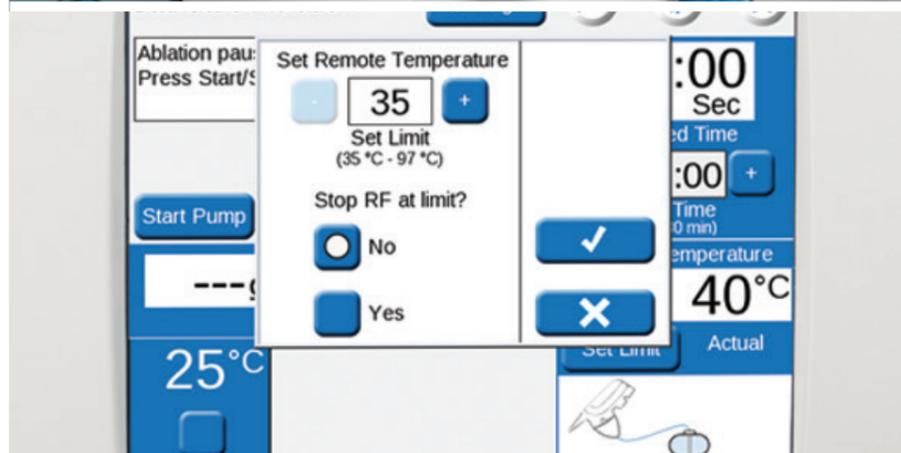

Para maiores informações, consulte o manual do equipamento



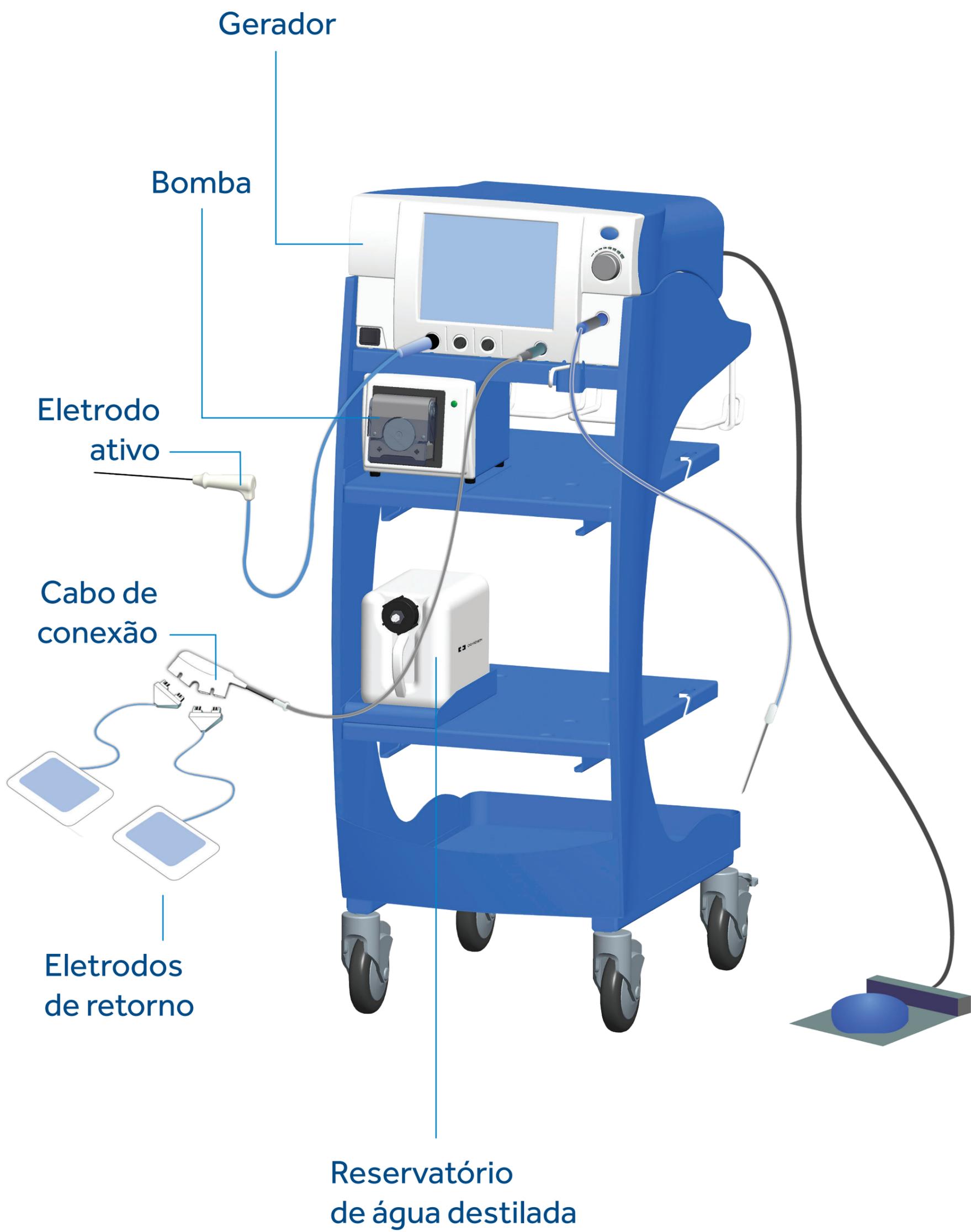

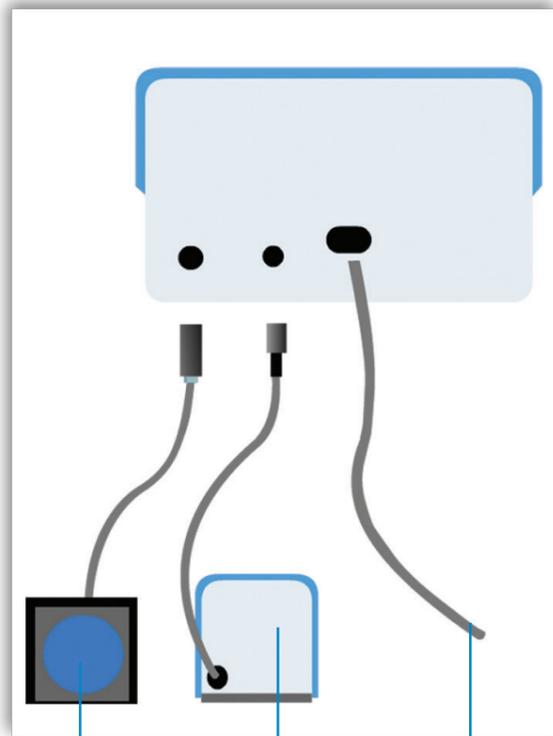

Pedal

Bomba

Cabo de força

ELETRODO

