



# NELLCOR<sup>MC</sup>

## GUIDE D'APPLICATION NÉONATALE DU CAPTEUR DE SPO<sub>2</sub> ADHÉSIF (MAX-N)


**APPLICATION NÉONATALE** (Chez un patient néonatal à la peau très fragile, considérez l'utilisation d'un capteur de SpO<sub>2</sub> non adhésif Nellcor<sup>MC</sup>.)

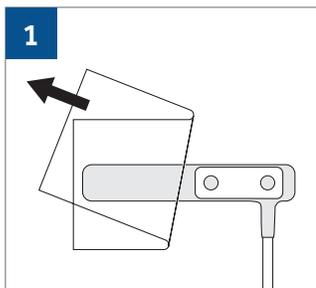


1 Pour les patients de moins de 3 kg. Placez la bande adhésive sur une surface plane, la face en tissu vers le bas. Retirez le revêtement arrière.

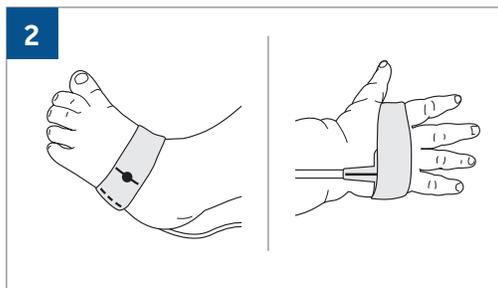


2 Choisissez un site d'application. Le pied est le site d'application de choix, juste sous les orteils, en gardant le câble sous la plante du pied. Toutefois, on peut aussi l'appliquer à la paume de la main. Ne jamais appliquer le capteur au poignet ni à la cheville.

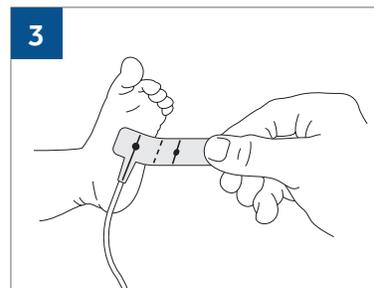

3 Positionnez le capteur pour que la ligne pointillée soit centrée sur l'axe latéral du pied ou de la main.

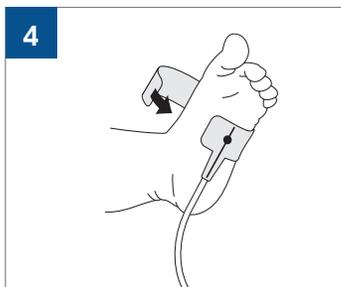

4 Enroulez le capteur autour du site, sans étirer l'adhésif, pour que les composants optiques se trouvent diamétralement opposés. Ancrez le câble à l'aide d'un adhésif de qualité médicale. Branchez l'embout connecteur du câble du capteur au câble patient relié au moniteur.

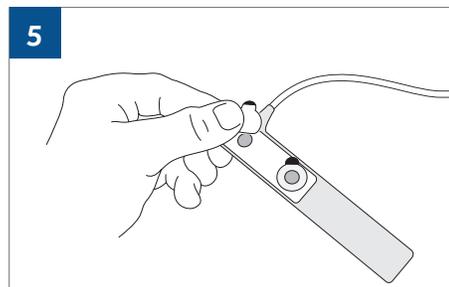

5 Les pastilles adhésives claires à double face incluses peuvent être appliquées sur la source de lumière et photodétecteur pour restaurer la qualité de l'adhésif et prolonger la durée de vie du capteur. Placez une pastille transparente sur chaque fenêtre, tel qu'illustré, puis retirez le papier protecteur qui recouvre la pastille avant de l'appliquer de nouveau au même patient.

Un maximum de trois pastilles peut être appliqué à chaque fenêtre, l'une sur l'autre. Le retrait d'une pastille qui a adhéré à une fenêtre risque d'endommager des composants du capteur.

Vérifiez le site du capteur, incluant l'intégrité cutanée, au moins une fois toutes les huit heures et changez de site au besoin.

**Votre représentant de produits Nellcor est en mesure de répondre à toutes vos questions au 1-877-664-8926.**



**IMPORTANT:** Veuillez consulter la notice d'accompagnement pour connaître toutes les directives d'emploi, les mises en garde, les précautions et les spécifications avant d'utiliser ce produit.

© 2018 Medtronic. Tous droits réservés. Le logo Medtronic et plus loin, ensemble sont des marques de commerce de Medtronic. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété d'une société affiliée à Medtronic. Licence de Santé Canada détenue par Covidien Inc. Fabriqué par : Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 États-Unis.  
CA-PMR-0291-F Rev. 04/2018



**Medtronic**