

GUIA DE LUZES INDICADORAS


iDrive™




Medtronic

MONTAGEM


DISPARADOR

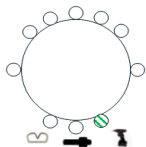


Calibração do Disparador.

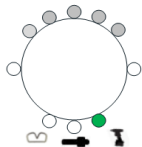

Disparador pronto para uso. Possui 15 ou mais cirurgias restantes.

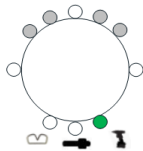


Disparador pronto para uso. Possui entre 6 e 14 cirurgias restantes.

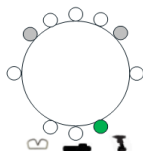


Disparador pronto para uso. Possui últimas 5 cirurgias restantes.


HASTE

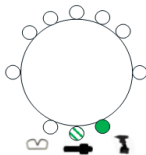


Calibração da haste.

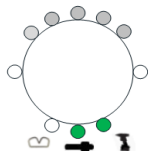

Haste pronta para uso. Possui 15 ou mais cirurgias restantes.

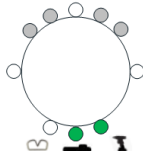


Haste pronta para uso. Possui entre 6 e 14 cirurgias restantes.

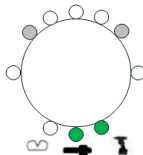


Haste pronta para uso. Possui últimas 5 cirurgias restantes.

MONTAGEM

CARGA

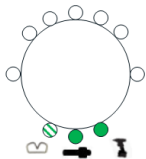


Calibração da carga. Necessita teste de abertura e fechamento.

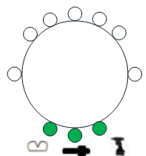


O teste de abertura e fechamento da carga foi bem sucedido, ela está **PRONTA PARA USO.**

MONTAGEM


EM USO

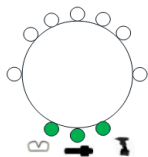

Durante todo o manuseio do iDrive™ somente as luzes indicadoras de componentes, na parte de baixo do grampeador, permanecerão acesas.

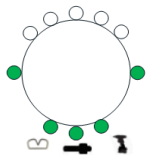


As Luzes Indicadoras de status vão se acender toda vez que a carga estiver fechada e vão se apagar quando a carga estiver aberta.

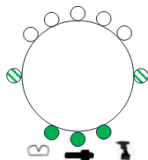


As Luzes Indicadoras de Status vão piscar verdes quando o modo disparo do iDrive™ for ativado.

Nesse momento as funções de Articulação e Rotação serão travadas e o Botão Azul se torna o botão de disparo.


MODO DISPARO ATIVO

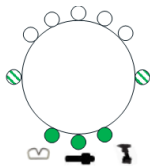


No início do disparo a lâmina começa a progredir e as Luzes Indicadoras de Progresso estarão apagadas.

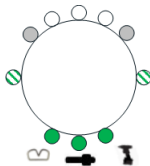

2 luzes indicadoras de progresso acesas indicam que a lâmina já percorreu 30mm.

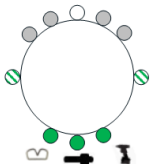


4 luzes indicadoras de progresso indicam que a lâmina já percorreu 45mm.

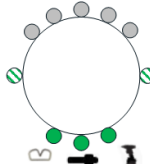

5 luzes indicadoras de progresso acesas indicam que a lâmina já percorreu 60mm.

FINAL DO DISPARO

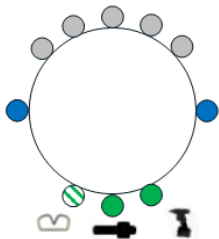

Ao final do disparo, as luzes indicadoras de progresso permanecerão acesas indicando a distância total que a lâmina percorreu: 2, 4 ou 5 luzes acesas, respectivamente para 30, 45 ou 60mm.


A lâmina deve ser recolhida apertando-se o Botão Cinza.

Então, o iDrive™ vai indicar que a Carga foi disparada com sucesso e há a necessidade de substituí-la por uma nova carga.




ERROS


DISPARADOR

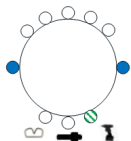

Falha na
calibração do
Disparador.
Necessita
substituí-lo.

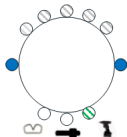


Fim da
vida útil do
disparador.

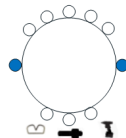

Bateria
acabando.
Necessita
substituí-la.

HASTE

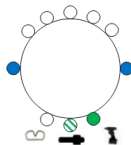


Falha na
calibração
da haste.
Necessário
substituí-la.



Fim de Vida
Útil da Haste.

CARGA

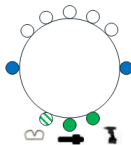

O teste de abertura e fechamento
da Carga foi mal sucedido e ela
necessita ser substituída.

Reg. n ° 10349000420 © 2019 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros são, em conjunto, marcas registradas da Medtronic.™ *Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. M. Luz 08/2019.

Medtronic