

GUIA DE STATUS

DA TELA OLED
SIGNIA™



Medtronic


MONTAGEM



Insira o manipulador no disparador com guia de inserção.




Conecte a haste.

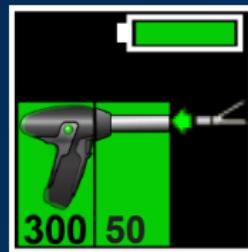

Conecte a carga.

MONTAGEM

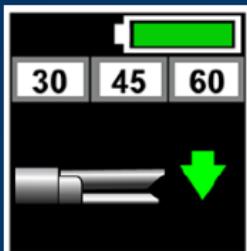

Feche a carga completamente.



Abra a carga completamente.



Pronto para uso.

MONTAGEM

HASTE NÃO COMPATÍVEL



QUANDO OCORRERÁ

Momento em que a haste for conectada.

SIGNIFICADO

A versão do software atual do manipulador não é compatível com a haste conectada (circular).

SINCRONIZANDO A HASTE



QUANDO OCORRERÁ

Momento em que a haste for conectada.

SIGNIFICADO

Leitura e calibração da haste sendo realizada.

STATUS



Disparador usado.
Substituir.



Fim da vida da haste.
Substituir.



Carga disparada.
Substituir.



Bateria baixa.
Restam 2 disparos.



Força excede o limite.
Não inicia ou conclui
o disparo.

CÓDIGOS DE ERROS



Erro geral.
Abrir e reconectar.



Erro no disparador.
Abrir e reconectar.



Erro na haste.
Reconectar/
substituir.



Erro na carga.
Reconectar/
substituir.


CÓDIGOS DE ERROS




Erro no manipulador.
Substituir.



Erro na bateria.
Substituir
o manipulador.

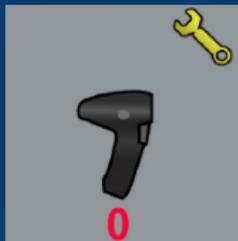

Fim da vida útil
do manipulador.
Substituir.

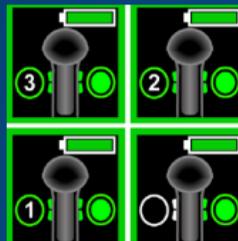

Para desativar e ativar o giro da haste,
pressione os botões do mesmo lado
simultaneamente por 3 segundos.

LATAM-BRA200045

Reg. n.º 10349000584 © 2020 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros são, em conjunto, marcas registradas da Medtronic.™ *Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. M. Luz 04/2020.

Medtronic