

## RESSOURCEN FÜR DIE INFEKTIONSKONTROLLE

### Zur Vorbereitung auf die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) Europäischer Markt

Sonosite versorgt alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen immer mit neuesten Informationen zu Point-of-Care-Ultraschall. Die Eindämmung von Infektionskrankheiten gewinnt weltweit an Bedeutung, und Sonosite nimmt dies sehr ernst. Wir möchten die vielen Mitarbeiter im Gesundheitswesen unterstützen, die sich auf die Aufgabe vorbereiten, unsere Kollegen sowie Patienten vor SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 auslöst, zu schützen.

#### Desinfektionsmittel gegen SARS-CoV-2

Nach den Leitlinien der amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention sind Verfahren zur Infektionskontrolle einschließlich administrativer Regeln und technischer Kontrollen, Umwelthygiene, korrekter Arbeitsmethoden und dem angemessenen Einsatz persönlicher Schutzausrüstung (PSA) erforderlich, um die Ausbreitung von Infektionen im medizinischen Bereich zu verhindern.<sup>1</sup>

Korrekte<sup>2</sup> und konsequente Einhaltung der Reinigungs- und Desinfektionsverfahren ist der entscheidende Faktor zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus. Dazu gehören routinemäßige Reinigung und Desinfektion mit krankenhaushausgeeigneten Desinfektionsmitteln nach jeder Maßnahme. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die im [Sonosite-Tool für Reinigungs- und Desinfektionsmittel](#) aufgeführt sind, wurden auf Kompatibilität mit Sonosite-Systemen, -Schallsonden und -Zubehör geprüft. Gegen SARS-CoV-2 werden Desinfektionsmittel empfohlen, die nach eigenen Angaben gegen neue virale Krankheitserreger und umhüllte Viren wirksam sind<sup>1</sup>

Angesichts der Dringlichkeit der COVID-19-Pandemie wird Sonosite seine europäischen Kunden in dieser Notsituation auch dann unterstützen, wenn sie Reinigungs- oder Desinfektionsmittel einsetzen, die nicht im Web-Tool aufgeführt sind, solange die Desinfektionsmittel krankenhaushausgeeignet sind und zu einer dieser vier Kategorien gehören:

1. Quartäre Ammoniumsalze
2. 0,5 % Natriumhypochlorit
3. 75 % Isopropanol oder Ethanol
4. 3 % Wasserstoffperoxid

Bitte beachten Sie, dass Sonosite keine Empfehlung dazu abgibt, welche spezifischen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwendet werden sollen, und dass unterschiedliche Desinfektionsmittel unterschiedliche Wirkungsniveaus gegen SARS-CoV-2, aber auch andere zu berücksichtigende Krankheitserreger aufweisen. Halten Sie sich bitte in allen Fällen sorgfältig an die Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers.

Bitte überprüfen Sie Ihr Sonosite-Produkt vor und nach jeder Maßnahme sorgfältig auf jedwede Art möglicher Beschädigung. Wenn Sie aufgrund der Benutzung dieser Desinfektionsmittel irgendwelche

kosmetischen Veränderungen an Geräten feststellen, wenden Sie sich mit Fragen dazu bitte unter [eraf-service@fujifilm.com](mailto:eraf-service@fujifilm.com) an den technischen Kundendienst von Sonosite.

### **Weitere Maßnahmen zur Infektionskontrolle und damit zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19.**

Um die Ausbreitungsmöglichkeiten von 2019-nCoV zu begrenzen, werden Einweg-Barrieren empfohlen. Zur Begrenzung von Kreuzkontaminationen werden Ultraschallgerätekappen, [Schallsondenabdeckungen](#) und Ultraschallgel-Einwegpakete empfohlen. Beachten Sie dabei bitte, dass auch bei Verwendung von Abdeckungen für die Geräte und Schallsonden das Ultraschallsystem in gleicher Weise gereinigt und desinfiziert werden muss wie wenn ohne Abdeckung gearbeitet wird.<sup>3</sup>

### **Zusätzliche Ressourcen**

Zur möglichst effektiven Reinigung halten Sie bitte die Anweisungen aus dem Benutzerhandbuch zur Reinigung und anschließenden Desinfektion des SonoSite-Ultraschallsystems, der Schallköpfe und Zubehörteile vollständig ein.

Spezifische Leitlinien zur Reinigung und Desinfektion jedes SonoSite-Ultraschallsystems finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch. Die [Benutzerhandbücher](#) für SonoSite-Ultraschallsysteme stehen auf unserer Website zum Download zur Verfügung.

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Anmerkungen bitte an Ihren örtlichen SonoSite-Vertreter oder unter [eraf-service@fujifilm.com](mailto:eraf-service@fujifilm.com) an den technischen Kundendienst von Sonosite.

1 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html>

2 <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf>

3 <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/reprocessing-medical-devices-health-care-settings-validation-methods-and-labeling>

FUJIFILM SonoSite, Inc., das SonoSite-Logo und andere Marken, die sich nicht im Besitz von Dritten befinden, sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von FUJIFILM SonoSite, Inc. in verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. ©2020 FUJIFILM Sonosite, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

M08012 3/2020